



CE catII Norma EN166:2001 contra COVID'19

**PEGASO** SAFETY 1956 **FICHA TÉCNICA** Mod. HERO Ref. 179

**9,95€** + IVA


FECHA LÍMITE DE PEDIDO:  
24-04-20  
FECHA ENTREGA PEDIDO:  
06/07-05-20



**EMPLEO**

La pantalla facial / gafa de montura integral se coloca en la cabeza del usuario ajustando el arnés hasta conseguir la perfecta colocación de esta, dejando "las manos libres" para la realización de las operaciones.

El arnés tiene un dispositivo de reversibilidad que permite abatir la pantalla sobre la cabeza dejando libre el rostro en los momentos en que no se estén realizando trabajos.

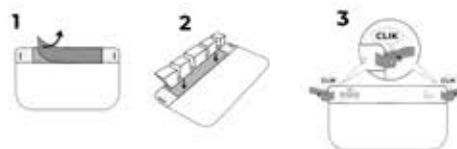

**CAMPOS DE USO:**

REF	VARIANTE	SÍMBOLO	TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE USO
179.01	Visor incoloro antivaho (2 caras)	3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)

**RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA**

Pueden limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua a temperatura ambiente y detergente suave no alcalino.

Una vez lavada, seque la pantalla con un paño. No utilizar el ocular hasta que no esté completamente seca. Mantener fuera del contacto con abrasivos, solvente o vapores solventes.

**ALMACENAJE**

Cada ocular se embala en una bolsa que la protege de polvo y la humedad. Reponer en la bolsa protectora cuando no esté en uso. Almacenar entre 5 y 40° C, con una humedad menor del 90%

**REFERENCIA DEL EPI**

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, según la norma EN 166:2001 (Protección individual, Equipos para la protección de los ojos y la cara) modificada por el Procedimiento de certificación de pantallas faciales y gafas para proteger contra COVID-19, que le son aplicables, según consta en el certificado emitido por AITEX, Plaza Emilio Sala nº1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.